


Mit diesem Prozedere werden im Kindergarten und der Primarschule die Speicheltests entnommen und gesammelt. Selbstverständlich werden die Kinder dabei sorgfältig angeleitet und die Lehrpersonen beachten die nötigen Hygienevorschriften (Lüften, Handschuhe für Lehrpersonen, Maskenpflicht für Lehrpersonen und 5./6.-KlässlerInnen, Händewaschen etc.).



ANLEITUNG ZUR SPEICHELPROBENNAHME

Vorher:

60 MIN

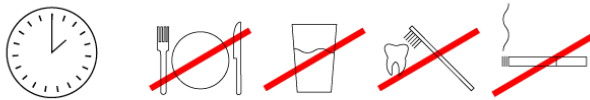

1

Ampulle öffnen
und Flüssigkeit in den
Mund nehmen



**STERILE, ISOTONISCHE
KOCHSALZLÖSUNG**

2

Flüssigkeit
im Mund gut
schwenken

10 SEC



3

Ins Gefäß
spucken



4

Mit geschlossenem
Mund trocken
nachkauen

15 SEC



5

Nochmals
ins Gefäß
spucken



6

Gefäß gut
verschliessen.
Fertig!



1X WIEDERHOLEN